

Если Вы доставляете изделие самостоятельно:

Время визита и адрес сервисного центра необходимо предварительно согласовать по телефону:

г. Балашиха, Моск. обл.: (495) 989-18-88 (доб. 312)

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 286-42-73

Отправлять или доставлять товар в сервисный центр следует только после получения от оператора номера Обращения и согласования времени и адреса сервисного центра.

Журнал гарантийных работ

Журнал заполняется только сотрудниками сервисного центра. Обязательная к заполнению информация:

- Номер заявки;
- Дата получения товара в сервисном центре;
- Описание ремонтных работ;
- ФИО мастера;
- Синяя печать сервисного центра.

Номер заявки	Дата и описание работ, ФИО мастер, печать сервисного центра

ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Влажная обработка мыльными растворами без применения абразивных чистящих средств. Периодически необходимо проводить дезинфекцию в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. Наружные поверхности обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей (например, 96% спиртом этиловым или 3% раствором перекиси водорода) по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке. Лампу и отражатели протирают тампоном из мягкой неворсистой ткани, смоченным 96% спиртом этиловым (тампон должен быть отжат).

Пыл с поверхности рециркулятора следует протирать сухой или слегка влажной мягкой тканью, смоченной в воде по мере необходимости.

По мере запыления защитного кожуха, необходимо его снять и промыть внутреннюю поверхность струей воды или налить в подходящую емкость небольшое количество воды, добавить немного моющего средства, прополоскать кожух в этом растворе, затем тщательно промыть проточной водой, положить на горизонтальную поверхность и оставить до полного высыхания (примерно 2 часа).

ВНИМАНИЕ

Чтобы не нарушить внутренний поверхностный слой защитного кожуха запрещается:

- трогать кожу рук или другими предметами, используйте медицинские перчатки, мягкой тампон;
- для промывки применять тряпки, губки или другие средства, содержащие абразивные вкрапления.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ* И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятные причины	Способы устранения
Рециркулятор не светится при включенном электроснабжении, вентилятор не работает.	1. Дефект сетевого электроснабжения. 2. Дефект вилки шнура питания. 3. Вышла из строя пускорегулирующая плата.	1. Устранить дефекты. 2. Заменить вилку. 3. Обратиться в сервисный центр.
Лампа загорается и гаснет, вентилятор не работает.	1. Затруднен свободный ход крыльчатки вентилятора. 2. Отсутствует питание вентилятора.	1. Освободить крыльчатку, удалить посторонний предмет. 2. Обратиться в сервисный центр.
Лампа не светится, вентилятор работает.	Неисправна лампа.	1. Заменить лампу.

Замена лампы осуществляется в порядке: описанном в п. «Замена лампы».

Комплектация

1. Рециркулятор - 1 шт.
2. Комплект крепежа - 1 уп.
3. Руководство - 1 экз.

Упакованные рециркуляторы должны быть уложены в транспортную тару из картона или другую тару, обеспечивающую сохранность рециркуляторов по ГОСТ Р 50444-92.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Рециркулятор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Рециркулятор транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортировки: температура окружающего воздуха от - 40°С до + 40 °С, относительная влажность воздуха до 80% при температуре + 25°С, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм тр. ст.).

Транспортировка и хранение рециркулятора без упаковки завода изготовителя не гарантирует его сохранность. Повреждения рециркулятора, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

Ультрафиолетовая лампа содержит пары ртути. Запрещается выбрасывать вышедшие из строя лампы в мусорный контейнер, они подлежат сдаче в пункты их утилизации.

Утилизация рециркулятора, за исключением ультрафиолетовой лампы, осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

Класс отходов по морфологическому признаку в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10: для ламп - класс Г, для рециркуляторов без ламп - класс А.

Изделие типа В Обратитесь к Руководству по эксплуатации Знак соответствия Условия эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Обратитесь к Руководству по эксплуатации Не выбрасывать! Специальные условия утилизации IP20 Степень пылевлагозащиты



Дополнительно к рециркулятору Вы можете приобрести

Лампа ультрафиолетовая



- ✓ Длительный срок службы
- ✓ Мощность лампы - не более 30 Вт
- ✓ Излучает коротковолновые ультрафиолетовые лучи с максимумом на длине волны 253 Нм

Подставка передвижная



- ✓ Обеспечивает легкость перемещения
- ✓ Оснащена колесами в основании
- ✓ Штатив выполнен из металла
- ✓ Простота крепления рециркулятора

Облучатель-рециркулятор медицинский «Armed»: CH111-115 (пластиковый корпус) соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07193 от 28.04.2011 г.

Изготовитель: Jiangsu Dengguan Medical Treatment Instrument Co., Ltd.,

No. 17, Danfeng West Road, Jintan City, Jiangsu Province, 213200, China

«Джиангсу Дэнуан Медикал Тритмент Инструмент Ко., Лтд.»,

№17 Данфэнг Вест Роад, город Джинтан, провинция Джангсу, 213200, Китай

Дистрибьютор: ООО «Медконтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н, тел.: (812) 702-73-02

Срок службы - не менее 3 лет.

Гарантийный срок на облучатель-рециркулятор медицинский «Armed»: CH111-115 (пластиковый корпус) – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.

На расходные материалы (ультрафиолетовая лампа) гарантия не предоставляется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Сервисный центр: ООО «Медконтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н

Телефоны сервисных центров:

г. Балашиха, Моск. обл.: (495) 989-12-89

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61 ашиха, шоссе Энтузиастов, Западная коммунальная зона, владение 1А



Облучатель-рециркулятор медицинский «Armed»: CH111-130 (пластиковый корпус)



Имеются противопоказания, перед использованием проконсультируйтесь со специалистом!



